

# TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

SINGCLEAN TEST



1 Vydezinifikujes si ruce




2 Posadis se ke stolu




3 Dostaneš instruktáž



4 Rozbalis si test

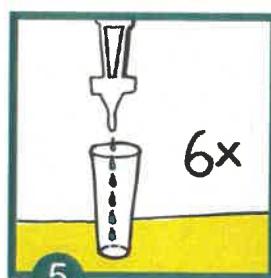

Do zkumavky nakapeš 6 kapek

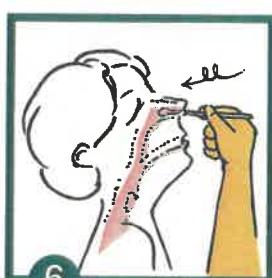

5 Tyčinkou 5x otočis v každé nosní dírce



6 Tyčinkou 10x otočis ve zkumavce s roztokem a nechás minutu stát



7 Setřes z tyčinky kapalini, uzavřeš zkumavku a nechás minutu stát




8 Nakapeš 3 kapky odstáteho roztoku do otvoru v testovací kazetě




9 Stopujeme 15 minut



10 A máš tu výsledek

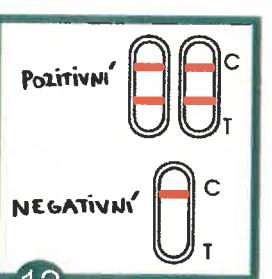

11 Výsledek testu se objeví v okénku testovací kazety

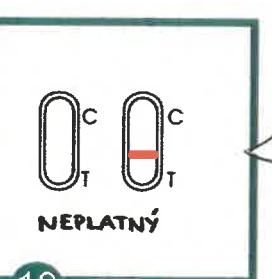

12 NEPLATNÝ  
13 Výsledek je neplatný, musíš se otestovat znova



14 Výsledek se zaznamená



15 Test vyhodíš a vydezinifikujes si ruce



16 Jsi negativní: pokračuješ do výuky s ostatními



17 Jsi pozitivní: počkáš na rodiče a jdeš domů



18 Škola ti vystaví potvrzení o tom, že ti test vyšel pozitivně



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



npi | Národní pedagogický institut  
České republiky